

ナステント<sup>®</sup>クラシック

再使用禁止

## 【警告】

- ・本品は医師若しくは医師の指示を受けた専門の医療従事者の指導の下で使用させてください。
- ・強引に挿入又は抜去させないでください。[ 出血する恐れがあります ]
- ・万が一鼻腔内に入り込んだり飲み込んだ場合には自分で取り出さないよう説明し、医師による処置を行ってください。[ 誤嚥や出血を起こす恐れがあります ]

## 【禁忌・禁止】

## &lt; 使用方法 &gt;

- ・再使用しないでください [ 粘膜の感染症を防ぐため ]
- ・再滅菌しないでください [ 本品の劣化を防ぐため ]
- ・チューブ本体を切断・加工しないでください [ 鼻腔内組織損傷を防ぐため ]
- ・ノーズクリッパーを強く引っ張ったり幅を広げたりしないでください [ ノーズクリッパーが破損し本品を正常に留置できなくなるため ]
- ・本品に塗布済みの潤滑剤以外は使用しないでください [ 皮膚または粘膜の炎症、感染症を防ぐため ]
- ・使用時間を超えて使用させないでください [ 皮膚または粘膜の炎症、鼻腔内組織の損傷を防ぐため ]

## &lt; 適用対象 &gt;


次に該当する方には使用させないこと

- ・本品の使用に必要な衛生管理を行えない方 [ 粘膜の感染症を引き起こす恐れがあります ]
- ・鼻出血しやすい方 [ 鼻出血する恐れがあります ]
- ・抗凝固剤を服用している方 [ 出血した際に止血時間が延長する恐れがあります ]
- ・鼻咽頭気道に出血、障害または疾病がある方 [ 症状が増悪する恐れがあります ]
- ・扁桃腺肥大等の基礎疾患がある方 [ 症状が増悪する恐れがあります ]
- ・消化管の疾患を罹患中または治療中の方 [ 誤飲した場合に排出されにくくなる恐れがあります ]
- ・呼吸器系の疾患を罹患中または治療中の方 [ 誤嚥を起こす恐れがあります ]

## 【形状・構造及び原理等】

## &lt; 形状・構造 &gt;

- ノーズクリッパー：ステンレス鋼
- チューブ：シリコーン

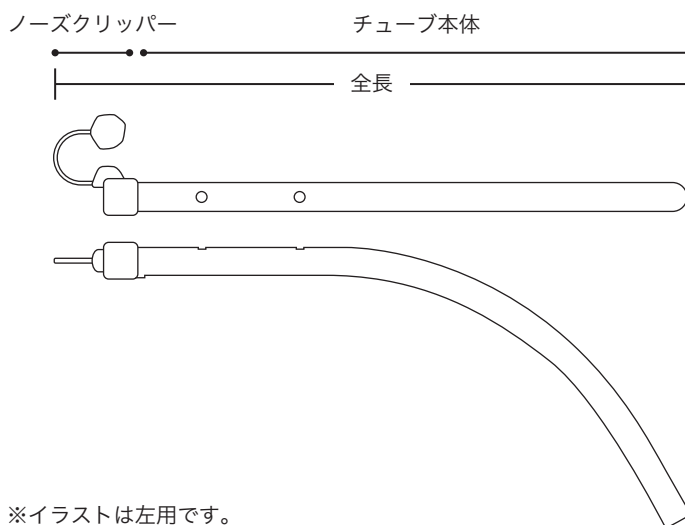

※イラストは左用です。

## &lt; サイズバリエーション &gt;

全長	ハードタイプ		ソフトタイプ	
	右用	左用	右用	左用
120mm	No.01	No.07	No.25	No.31
125mm	No.02	No.08	No.26	No.32
130mm	No.03	No.09	No.27	No.33
135mm	No.04	No.10	No.28	No.34
140mm	No.05	No.11	No.29	No.35
145mm	No.06	No.12	No.30	No.36

\*ナステントは口蓋垂（のどちんこ）まで十分届く長さが必要です。  
サイズの選択には本品をご使用ください。

## &lt; 原理 &gt;

本品は、チューブ先端を鼻腔に沿って口蓋垂（のどちんこ）まで挿入することで、機械的に気道の開存性を確保することができる。

## &lt; 原材料 &gt;

シリコーン、ステンレス鋼、グリセリン水溶液

## &lt; 滅菌方法 &gt;




高圧蒸気滅菌

### 【使用目的又は効果】

鼻孔から口蓋垂（のどちんこ）まで挿入して気道の開存性を保持する。咽頭部への脱落防止のために鼻孔端部に固定するためのストッパーを有する。

### 【使用方法等】

1. パッケージに記載された番号に従い開封し、清潔にした手で本品を取り出します。
2. 二つの穴が上面に来るようにチューブ本体を持ち、潤滑剤が塗布されている側から適切な鼻孔（右用は右、左用は左の鼻孔）にゆっくりと挿入します。a
3. 鼻腔を経て口蓋垂（のどちんこ）まで挿入したら、ノーズクリッパーで鼻柱を挟み込み外れないように確実に取りつめます。この際、鼻で呼吸し通気していることを確認してください。b
4. 鏡などで本品の先端が軟口蓋から出ていることを確認します。（個人差により見えづらい場合があります。）c
5. 使用時間内でご使用ください。
6. 使用後は本品をゆっくり取り外し廃棄します。d

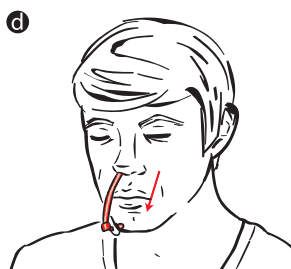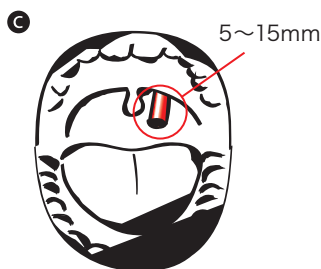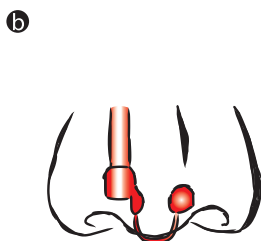

### < 使用方法等に関連する使用上の注意 >

- ・本品の使用で強い不快感や喉や鼻の痛み、頻繁な吐き気を訴える場合は使用を中止させてください。
- ・最初の数日間は、ある程度の違和感が生じる場合があります。
- ・勢いよく挿入又は抜去すると鼻粘膜を損傷する恐れがあります。

### 【使用上の注意】

#### < 重要な基本的注意 >

- ・別紙の使用マニュアルをよく読むように指導してください。
- ・本品装用中の飲食は控えるよう指導してください。[ チューブの閉塞を防ぐため ]
- ・強い不快感や痛み、頻繁な吐き気、呼吸困難に陥った場合は直ちに使用を中止させてください。
- ・最初の数日間は無意識に取り外してしまうことがあります。

### < 不具合・有害事象 >

- ・不具合  
チューブの閉塞、潰れ、キック、破損  
ノーズクリッパーの変形、脱落、破折
- ・有害事象  
皮膚又は粘膜の炎症、化膿、粘膜の感染症、再発性または持続性鼻出血、鼻腔内組織損傷、鼻中隔組織損傷、本体の嚥下、呼吸機能異常等

### 【保管方法及び有効期限等】

#### < 保管方法 >

- ・直射日光を避け、清潔な場所で室温保管してください。
- ・小児の手の届かない場所に保管してください。

#### < 使用期限 >

本品の包装に記載された使用期限内に使用してください。

[ 自己認証（当社）データ ] による ]

#### < 使用時間 >

最大 10 時間

### 【包装】

1 箱 7 本入

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### < 製造販売業者 >

ナステント 株式会社

〒102-0084 東京都千代田区二番町 9-3 THE BASE 麹町

Tel : 03(6453)7018 Fax : 03(6453)7019

#### < 外国製造業者 >

Ningbo Licheng Super Resin Co.,Ltd. (中国)